



Gepolsterde rug
Zachte okselondersteuning
Vrij zitvlak

Ideaal voor toiletbezoek


Het vlot en eenvoudig kleden van het onderlichaam is vaak een uitdaging, veelal gepaard met tijdsdruk als het gaat om een toiletbezoek. Onze Toileting Slings E-clip bieden een praktische oplossing aan vele cliënten en hun verzorgers om rechtstreeks van bed/stoel naar een toilet of poststoel een transfer te maken.



Art. nr. 25085C



Art. nr. 25085C

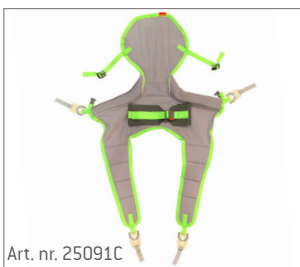

Art. nr. 25091C

Comfortabele transfer

Terwijl de cliënt in de tilband zit, is het zitvlak volledig vrij voor het verwijderen en aanbrengen van onderkleding en een toiletbezoek. Deze tilbanden hebben een verstevigd rugdeel en zachte vulling onder de oksels om adequate en comfortabele steun aan de cliënt te bieden tijdens de transfer. De tilband wordt net boven het bekken geplaatst en heeft extra lange beendelen, waardoor deze tilband eenvoudig zelfs in een zittende houding aan te brengen en te verwijderen is. Hierdoor kan deze tilband ook gebruikt worden om cliënten van smalle rolstoelen naar kuipzittingen te tillen en in bad of douche.

Drie modellen voor juiste ondersteuning

De tilband met het lage rugdeel is uitermate geschikt voor actieve cliënten met een goede schouderfunctie. Onze andere twee toiletbanden kenmerken zich door het hoge ondersteunende rugdeel met verstelbare nekondersteuning, die eveneens als hoofdondersteuning ingezet kan worden door de verstelbare banden. De hoofdsteun is prettig voor cliënten die de neiging hebben zichzelf te overstrekken en over een verminderde romp- en hoofdbalans beschikken.

Voor passieve transfers adviseren wij de Toileting Sling High Soft. Door het zachte materiaal en het ontwerp ervaart de cliënt nog meer steun tijdens

de transfer. De instelbare buikbandondersteuning voorkomt het verschuiven van de tilband tijdens de transfer.

Flexibel en luchtig

Het polyester net materiaal heeft een lage wrijvingsweerstand zodat deze gemakkelijk aan te brengen is. Tevens droogt de tilband snel na het wassen of baden. Het materiaal heeft licht elastische eigenschappen om zich te vormen naar het lichaam van de cliënt. De tilband kan kortere tijd achter de cliënt blijven.

Het Soft Air Mesh materiaal is een lichtgewicht, koele, zachte en ademende net stof. Deze stof heeft vochtbeheersende eigenschappen, die transpiratievocht via het weefsel naar het oppervlak transporteert waar het snel kan verdampen. Het materiaal heeft tevens het voordeel dat het minder gevoelig is voor bacteriën voor betere hygiëne. De tilband heeft “two-way stretch” eigenschappen, die in staat zijn het lichaam te omhelzen als een tweede huid.

Een optimale positie wordt bereikt doordat deze tilband bevestigd is aan een kanteljuk, waarmee de cliënt in de juiste houding gebracht wordt voor het toiletbezoek. Combineer met een van onze plafond- of passieve tilliften.



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

Accessoires



4-punts kanteljuk
voor plafondtilt HeliQ,
verkrijgbaar in Small
(manueel), Medium en
Large (elektrisch). Art. nr.
92441, 92442 en 92443.



4-punts kanteljuk
voor Diana II Comfort
4ESB (elektrisch).
Art. nr. 90560.



4-punts kanteljuk
voor Diana II/
Diana II Comfort
4MSB (manueel),
Art. nr. 90558/ 90559.



4-punts kanteljuk
voor Eline/Eline eFlow
4ESB (elektrisch),
Art. nr. 90570/90565


Gebruik




Van en naar het bed
Geschikt voor het tillen
vanaf een bed en gaan
zitten op een bed.



Van en naar een stoel
Geschikt voor
positionering in een stoel
en voor een transfers in
en uit een stoel.

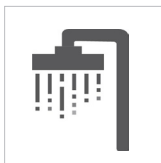


Douchen
Polyester Net materiaal
is geschikt voor natte
omgeving.

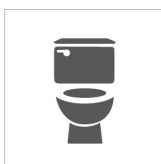


Toiletbezoek
Biedt extra steun tijdens
een bezoek aan het toilet.

Kenmerken

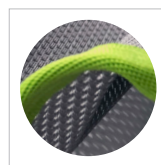


Polyester Net
Zacht, dun materiaal dat
ventileert en snel droogt.
Ideaal voor natte situaties
zoals baden en douchen.

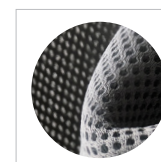

Soft Air Mesh
Geweldig drukverlichtend
effect. De druk is
goed verdeeld binnen de
3D-structuur van de stof.
Voorkomt en beschermt.



E-clip ingebouwde borging
Eénhandig te bedienen.
Universeel inzetbaar
op alle liften die zijn
uitgerust met paddens-
toelbevestiging Ø 6,8-8,2
mm.

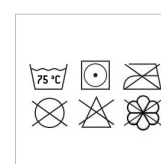


Verzorgingsinstructies
Was- en verzorgings-
instructies op het label
van de tilband. Gebruik
een goedgekeurde
waszak tijdens het
wassen.


Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Toileting Sling E-clip Net JM	25085C-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11"	73 cm / 28.7"	26 cm / 10.2"
Toileting Sling E-clip Net S	25085C-S	Small	S	32 cm / 12.6"	82 cm / 32.3"	30 cm / 11.8"
Toileting Sling E-clip Net M	25085C-M	Medium	M	48 cm / 18.9"	90 cm / 35.4"	33 cm / 13"
Toileting Sling E-clip Net L	25085C-L	Large	L	50 cm / 19.7"	98 cm / 38.6"	33 cm / 13"
Toileting Sling E-clip Net XL	25085C-XL	Extra Large	XL	56 cm / 22"	101 cm / 39.8"	38 cm / 15"
Toileting Sling High E-clip Soft JS	25091C-JS	Junior Small	JS	29 cm / 11.4"	76 cm / 29.9"	68 cm / 26.8"
Toileting Sling High E-clip Soft JM	25091C-JM	Junior Medium	JM	32 cm / 12.6"	82 cm / 32.2"	72 cm / 28.3"
Toileting Sling High E-clip Soft S	25091C-S	Small	S	42 cm / 18.8"	92 cm / 32.3"	74 cm / 29.1"
Toileting Sling High E-clip Soft M	25091C-M	Medium	M	44 cm / 17.3"	97 cm / 38.2"	80 cm / 31.5"
Toileting Sling High E-clip Soft L	25091C-L	Large	L	49 cm / 19.3"	98 cm / 38.6"	85 cm / 33.5"
Toileting Sling High E-clip Soft XL	25091C-XL	Extra Large	XL	51 cm / 20.1"	101 cm / 50"	93 cm / 36.6"

Maximaal gebruikersgewicht: 300 kg / 660 lb
** 25090C, Toileting Sling High E-clip Net, zie handleiding

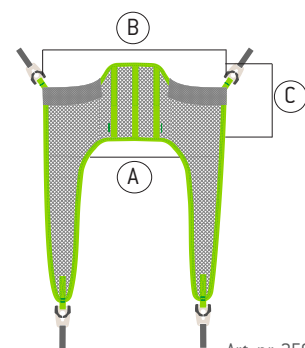

Art. nr. 25085C

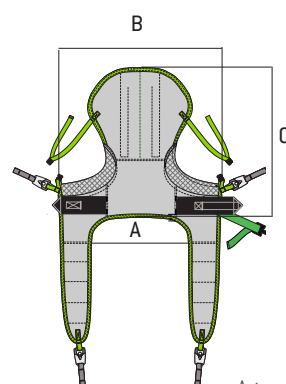

Art. nr. 25091C



*We improve freedom of movement
and quality of care for people.*

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elsperweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com