



Comfortabele pasvorm

Optimale ondersteuning

Veilige E-clips



## Geschikt voor vele tilsituaties

Onze Full Body Sling E-clip is een comfortabele tilband, die uitermate geschikt is voor personen die tijdens het tillen volledige ondersteuning van het lichaam prettig vinden. Deze tilband is verkrijgbaar met geïntegreerde hoofdsteen of met verwijderbare baleinen voor het geval deze tilband als verblijfsband wordt gebruikt.



De Full Body Sling E-clip biedt door zijn vorm een comfortabele ondersteuning aan het hoofd, de romp en bovenbenen, waardoor de cliënt een veilige houding ervaart. Deze tilband brengt de cliënt in een achterovergekeerde positie, die de druk op de benen vermindert. Dit kan ook een prettige houding zijn voor cliënten met een verminderde rompbalans en/of met de neiging om te overstrekken. Deze gekantelde positie voorkomt tevens dat een cliënt uit de tilband glijdt. De geïntegreerde en verstevigde hoofdsteen maakt deze tilbands zelfs geschikt voor het tillen van een cliënt vanaf een vlakke ondergrond, zoals een vloer. Deze tilbanden zijn ontworpen voor vierpuntsbevestiging aan een kanteljuk en zijn verkrijgbaar in twee materialen.

**Polyester net is een zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt.** Het heeft licht elastische eigenschappen om zich te vormen naar het lichaam. De tilband kan korte tijd achter de cliënt blijven. Extra voordeel is dat de tilband geschikt is voor douchen en baden.

**Het Soft Air Mesh materiaal is een lichtgewicht, koele, zachte en ademende net stof.** Deze stof heeft vochtbeheersende eigenschappen, die transpiratievocht via het weefsel naar het oppervlak transporteert waar het snel kan verdampen. Het materiaal heeft tevens het voordeel dat het minder gevoelig is voor bacteriën voor betere hygiëne. De tilband heeft "two-way stretch" eigenschappen, die in staat zijn het lichaam te omhelzen als een tweede huid.



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

## Accessoires



**4-punts kanteljuk**  
Voor plafondtillift HeliQ, verkrijgbaar in Small (manueel), Medium en Large (elektrisch). Art. nr. 92441, 92442 en 92443.



**4-punts kanteljuk**  
Voor Diana II Comfort 4ESB (elektrisch). Art. nr. 90560.



**4-punts kanteljuk**  
Voor Diana II/ Diana II Comfort 4MSB (manueel), Art. nr. 90558/ 90559.



**In-Situ**  
De Full Body Sling In-Situ E-clip heeft verwijderbare baleinen voor het geval de tilband achter de cliënt blijft. Art. nr. 25011C

## Gebruik




**Van en naar het bed**  
Geschikt voor het tillen vanaf een bed en gaan zitten op een bed.



**Van en naar een stoel**  
Geschikt voor positionering in een stoel en voor transfers in en uit een stoel.




**Douchen**  
Polyester Net materiaal is geschikt voor natte omgeving.

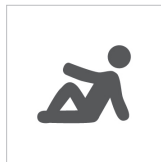

**Tillen vanaf de vloer**  
Ontworpen om op te tillen vanaf de vloer.


## Kenmerken

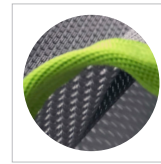


**Polyester Net**  
Zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt. Ideaal voor douchen en baden. Art. nr. 25005C.



**E-clip ingebouwde borging**  
Eénhandig te bedienen. Universeel inzetbaar op alle liften die zijn uitgerust met paddenstoelbevestiging Ø 6,8-8,2 mm.

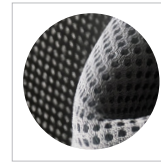


**Soft Air Mesh**  
Geweldig drukverlichtend effect. De druk is goed verdeeld binnen de 3D-structuur van de stof. Voorkomt en beschermt. Art. nr. 25010C/25011C

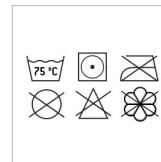

**Verzorgingsinstructies**  
Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.

## Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Full Body Sling E-clip Net JS	25005C-JS	Junior Small	JS	16 cm / 6.3"	63 cm / 24.8"	76 cm / 29.9"
Full Body Sling E-clip Soft JS	25010C-JS					
Full Body Sling In-Situ E-clip JS	25011C-JS					
Full Body Sling E-clip Net JM	25005C-JM	Junior Medium	JM	19 cm / 7.5"	67 cm / 26.4"	80 cm / 31.5"
Full Body Sling E-clip Soft JM	25010C-JM					
Full Body Sling In-Situ E-clip JM	25011C-JM					
Full Body Sling E-clip Net S	25005C-S	Small	S	31 cm / 13.8"	85 cm / 30.3"	90 cm / 35.4"
Full Body Sling E-clip Soft S	25010C-S					
Full Body Sling In-Situ E-clip S	25011C-S					
Full Body Sling E-clip Net M	25005C-M	Medium	M	40 cm / 15.7"	92 cm / 34.6"	91 cm / 35.8"
Full Body Sling E-clip Soft M	25010C-M					
Full Body Sling In-Situ E-clip M	25011C-M					
Full Body Sling E-clip Net L	25005C-L	Large	L	40 cm / 17.3"	98 cm / 38.6"	100 cm / 39.3"
Full Body Sling E-clip Soft L	25010C-L					
Full Body Sling In-Situ E-clip L	25011C-L					
Full Body Sling E-clip Net XL	25005C-XL	Extra Large	XL	44 cm / 18.9"	105 cm / 41.3"	102 cm / 40.1"
Full Body Sling E-clip Soft JS	25010C-XL					
Full Body Sling In-Situ E-clip XL	25011C-XL					
Full Body Sling E-clip Net XXL	25005C-XXL	Extra Large [2x]	XXL	44 cm / 18.9"	111 cm / 43.7"	106 cm / 41.7"
Full Body Sling E-clip Soft XXL	25010C-XXL					
Full Body Sling In-Situ E-clip XXL	25011C-XXL					
Full Body Sling E-clip Net XXXL	25005C-XXXL	Extra Large [3x]	XXXL	44 cm / 18.9"	118 cm / 46.4"	108 cm / 42.5"
Full Body Sling E-clip Soft XXXL	25010C-XXXL					
Full Body Sling In-Situ E-clip XXXL	25011C-XXXL					
Maximum user weight		300 kg / 660 lbs				

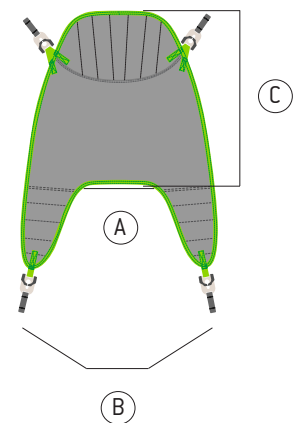

98011 Rev 03 NL Product Sheet Full Body Sling E-clip, Aug 2022



**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE THE NETHERLANDS**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com