



Mobi Pro & Flexi

Gebruikshandleiding

Inhoudsopgave

Controlelijst Mobi Pro of Mobi Pro Flexi	3
Introductie	4
Algemene informatie	5
Veiligheidsinstructies	6
Overzichtstekening & Technische gegevens	8
Bedieningsinstructie	9
Inspectie en onderhoud	12
Certificaten	13
Fabrikant & leverancier	14

Controlelijst Mobi Pro of Flexi

Datum				
Ordernummer				
Serienummer				
	<u>JA</u>	<u>NEE</u>	<u>NVT</u>	<u>EVT. TOELICHTING</u>
Functies gecontroleerd (werkt AB, hoog/laag etc.)				
Etiketten aanwezig				
Schoon afgeleverd				
Accu opgeladen				
Afstandsbediening				
Laadsnoer				
Gebruiksaanwijzing bijgevoegd				
Toebehoren geleverd (tilband etc.)				
Bijzonderheden				

Controle uitgevoerd door:

Bedrijf:

Naam:

Paraaf:

Introductie

Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Mobi Pro of Mobi Pro Flexi!

Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u efficiënt en met plezier vele jaren met dit product kunt werken. Human Care Nederland bestaat al sinds 1996 en heeft vanaf het begin kwaliteit van product en dienst boven alles gesteld. Zo zijn wij sinds 1999 in het bezit van het ISO 9001 certificaat en dragen al onze producten het CE keurmerk. Wij hopen dan ook dat u dit zelf ervaart in het dagelijkse gebruik van dit product.

Directe communicatie met onze eindgebruikers vinden wij van essentieel belang. U, onze eindgebruiker, bent namelijk degene die de meest waardevolle terugkoppeling kan geven over hoe wij onze producten en diensten kunnen blijven verbeteren. Wij nodigen u dan ook uit om met ons in contact te treden indien u een suggestie/opmerking/klacht/etc. heeft.

Als laatst willen wij u wijzen op de mogelijkheden die u op onze website **www.humancare.nl** zult aantreffen. Naast elektronische documenten (zoals eventuele latere versies van gebruiksaanwijzingen) treft u ook informatie aan over andere producten en Human Care nieuws.

Met vriendelijke groet,
Human Care Nederland B.V.

Algemene informatie

De Mobi Pro/Flexi is een verrijdbare actieve opstahulp met wegdraaibare zitschalen, bedoeld voor mensen die zelfstandig of met hulp kunnen gaan staan, maar moeilijk of niet kunnen lopen.

De Mobi biedt steun bij het gaan staan en is een effectief hulpmiddel voor de zorgverlener om de hulpvrager te verplaatsen.

De voeten worden op de stevige en stroeve voetenplaat geplaatst. Waarna de belanghebbende zich met behulp van de solide beugel zelf kan optrekken en gaan staan. Hierdoor wordt de belanghebbende aangemoedigd actief te blijven.

Deze opstahulp is speciaal ontworpen voor het gebruik in natte ruimten en past om de meest gangbare toiletten en valt binnen de wielen van de meest gangbare (rol)stoelen.

De Mobi Pro is een vrijwel onderhoudsarm hulpmiddel. Laat regelmatig de wielen en jaarlijks de constructie controleren.

De Mobi Pro Flexi is uitgevoerd met een manueel poot-spreid mechanisme. Hierdoor kunnen de poten in drie verschillen standen gezet worden. Verstelbaar van 43 tot 70 cm.

Bedoelt gebruik

De Mobi opstahulp is bedoeld om een persoon tot 150 kg te verplaatsen. De persoon wordt door middel van eigen kracht of met behulp van een hulpverlener omhoog geholpen, waarna de persoon vervolgens kan gaan zitten. De Mobi kan bedient worden door een enkele hulpverlener.

De Mobi is een verrijdbare en gemakkelijk manoeuvreerbaar hulpmiddel waarmee personen getransfereerd kunnen worden van bijvoorbeeld bed naar toilet en andersom. Deze transfermomenten kunnen in één ruimte plaatsvinden of in meerdere ruimtes, waarbij de afstand met de Mobi overbrugd wordt.

De Mobi is klein en compact. Dit betekent dat de Mobi in zeer veel situaties in te zetten is, waarbij deze ook gebruikt kan worden in kleinere ruimtes. Door de mogelijkheid van twee verschillende modellen kan er altijd voor het meest geschikte hulpmiddel gekozen worden.

Uitvoeringen

Mobi Pro: De Mobi Pro is voorzien van vier wielen, solide voetplaat, stevig frame, twee wegzwenkbare zitschalen, kniesteun, handvat en duwhandvatten. De poten zijn aan de voorkant versmald waardoor deze om een toiletpot kan en binnen de meeste stoelen valt.

Mobi Pro Flexi: De Mobi Pro Flexi is gelijk aan de Mobi Pro, alleen heeft deze rechte poten en een hendel om de poten in drie verschillende standen te zetten. Door het spreiden van de poten kan de Mobi Pro Flexi vrijwel om iedere (rol)stoel heen.

De Mobi Pro serie wordt uitgeleverd in een antraciet grijs frame, witte voetplaat en voorzien van donker blauwe zitvlakken en kniesteun.

Lees vóór gebruik eerst de instructiehandleiding voor zowel de patiëntentilift als de tilaccessoires door. Het transfereren van een persoon houdt altijd een bepaald risico in. Het is belangrijk om de inhoud van de instructiehandleidingen volledig te begrijpen en ernaar te werken. Het apparaat mag alleen gebruikt worden door getraind personeel.

Neem bij twijfel of vragen contact op met Human Care, uw gemeente of uw dealer.

Veiligheidsinstructies

LET OP!

Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie voor de gebruiker van dit product. Eenieder die het product gebruikt, moet de inhoud van de gebruikershandleiding doornemen en volledig begrijpen en zich eraan houden. Denk eraan de gebruikershandleiding te bewaren op een plek waar deze altijd beschikbaar is voor de personen die het product gebruiken.

Waarschuwing!

Bepaalde omstandigheden en omgevingen kunnen een correct gebruik van de mobiele tilliften beperken, bijv. drempels, ongelijke vloeren, allerlei obstakels en extra dik tapijt. Deze omstandigheden en omgevingen kunnen ervoor zorgen dat de wielen van de mobiele lift niet goed rollen, dat er mogelijk onbalans is in de mobiele lift en/of een grotere krachtinspanning van de zorgverlener nodig is. Wanneer u niet zeker weet of uw zorgomgeving voldoet aan de eisen voor een correct gebruik van de mobiele lift, kunt u voor hulp en advies contact opnemen met de vertegenwoordiger van Human Care.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Bevestig de tilband ALTIJD volgens de bijhorende instructies van de meegeleverde tilband.
- Controleer ALTIJD of de werkbelasting van de Mobi geschikt is voor het gewicht van de patiënt.
- Voer de transfers ALTIJD uit volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
- Maak NOOIT een bedienings- of veiligheidsfunctie los en probeer zo'n functie ook NOOIT te vermijden omdat het dan makkelijker lijkt om het hulpmiddel te bedienen.
- Gebruik ALTIJD de daarvoor bestemde duw handvatten om de tillift te manoeuvreren.
- Duw een belast hulpmiddel NIET sneller voort dan op een langzaam wandeltempo (3 km/uur - 0,8 meter/seconde).
- Duw de tillift NIET over ongelijke of ruwe ondergrond. Vooral niet met een persoon erin.
- Probeer een belast hulpmiddel NIET over een hindernis op de vloer te duwen/trekken, waar de zwenkwielen niet overheen kunnen rijden.
- Forceer NOOIT een bedieningshendel. Alle bedieningselementen zijn makkelijk te gebruiken en er is niet veel kracht voor nodig.
- Parkeer een belast hulpmiddel NOOIT op een hellend oppervlak.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Til een patiënt NIET op tenzij u getraind en competent bent om dit te doen.
- Dit hulpmiddel is voor het optillen van patiënten. Gebruik deze NIET voor andere doeleinden en sta dit ook NIET toe.
- Ga NIET met het hulpmiddel van een trap af, met of zonder patiënt.
- Probeer NIET met een belast hulpmiddel een helling van meer dan 5 graden (ongeveer 1:12) te overwinnen.
- Probeer niet een helling op te gaan zonder een tweede begeleider erbij.

Zorg er voor gebruik altijd voor dat:

- De eventuele tilaccessoires op de juiste manier aan de tillift bevestigd zijn;
- U de instructiehandleidingen voor het hulpmiddel gelezen heeft;
- Personeel dat met de lift werkt, geïnformeerd is over de juiste bediening en gebruik van de tillift;
- U de DAGELIJKSE CONTROLE ALTIJD uitvoert, voordat u de tillift gaat gebruiken;
- U zichzelf ALTIJD vertrouwd maakt met de bedieningselementen en veiligheidsvoorzieningen voordat u een patiënt gaat transfereren.

Veiligheidsinstructies

Laat een patiënt nooit zonder toezicht achter als deze zich in het hulpmiddel bevindt!

Het hulpmiddel mag onder geen beding worden gemodificeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen met Human Care.

Het hulpmiddel mag niet gebruikt worden in omgevingen waar ontvlambare mengsels kunnen ontstaan, bijv. in opslagruimtes van ontvlambare stoffen.

Jaarlijkse inspectie en onderhoud door geautoriseerd personeel is elke 12 maanden vereist.

- In geval van molest, achterstallig onderhoud en onjuist gebruik kan Human Care niet verantwoordelijk gehouden worden voor de ontstane schade en de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgschade.
- Het verdient aanbeveling regelmatig de Mobi op loszittende delen te controleren. Verwijder regelmatig vuil tussen de wielen. Laat de Mobi minimaal jaarlijks controleren/inspecteren.
- Het gewicht van de te tillen persoon mag niet de 150 kg overschrijden. Gebruik voor personen boven de 150 kg en ander hulpmiddel. Bijvoorbeeld een transportstoel.
- Niet meer dan één persoon tegelijk tillen met de Lexa tillift.

Overzichtstekening & Technische gegevens

1. Duw/trek handvat met zachte polstering
2. Handvat-stang voor veilige transfers
3. Zacht gepolsterde en wegklapbare zitschaal
4. Draaischarnier
5. Zacht gepolsterde kniesteun
6. Voetplaat met opstaande rand
7. Smalle poten (Mobi Pro)
8. Dubbel ongeremd wiel
9. Pootspreid hendel (Flexi)
10. 3-stand tandwiel voor opening poten (Flexi)
11. Rechte poten welke mechanisch verstelbaar zijn (Flexi)
12. Dubbel geremd wiel



Lengte	95 cm
Breedte	64 achter (en 37 cm voor (Pro))
Hoogte onderstel	10,5 cm
Hoogte zitschalen	73 – 80 cm schuin oplopend
Hoogste punt duwhandvatten	92 tot 98 cm (handvat loopt schuin op)
Wiel diameter	7,5 cm
Opening poten (Flexi)	Van 43 tot 70 cm (binnen maat)
Eigen gewicht	27 kg
Draagvermogen	160 kg

Bedieningsinstructie

Installatie en het gebruik van de Mobi

Zorg ervoor dat u de volgende checklist heeft doorgenomen voordat de transferhulp in gebruik wordt genomen.

- De Mobi is ontworpen voor het gebruik op vlakke, stevige en genivelleerde vloeren en voornamelijk bedoeld voor het gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat de "baan" van uw transfer vrij is van obstakels; Meubilair en andere items moeten worden verwijderd uit de transportroute. Houd het werkgebied dat vrij is van obstakels
- Wees voorzichtig met elke transfer en raadpleeg de eventuele lift-procedure van de patiënt.
- De conditie van de patiënt moet worden bewaakt tijdens de transfer.
- Het hulpmiddel mag alleen door geschoold deskundig personeel worden gebruikt.
- De werking van het hulpmiddel moet, indien mogelijk, aan de patiënt worden uitgelegd.

Als de omgeving en de patiënt voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, zal de Mobi Pro u een grote steun in het dagelijks leven zijn.

Werken met de Mobi

Aan de hand van de volgende zes afbeeldingen wordt stap voor stap uitgelegd hoe de Mobi gebruikt dient te worden. Mocht u na het gezien te hebben van de instructie nog vragen hebben, neem dan contact op met uw dealer, de gemeente of Human Care Nederland.

Stap 1



Klap de zitschalen omhoog alvorens u richting de gebruiker rijdt. Sta recht op met een rechte rug en nader de gebruiker.

Stap 2



Vervolgens zet de gebruiker zijn voeten op de voetplaat (eventueel met hulp).

Stap 3



Zet de Mobi op de rem en vraag of de gebruiker de armstang vastpakt. Hij/zij kan zichzelf nu omhoog trekken (eventueel met hulp).

Stap 4



Nadat de gebruiker stevig staat, klap de zitschalen naar beneden en vervolgens kan de gebruiker gaan zitten.

Bedieningsinstructie

Stap 5



Zorg ervoor dat de gebruiker stevig zit met de knieën/schenen tegen de steun. Vraag altijd of de gebruiker comfortabel zit.

Stap 6



Haal de wielen van de rem en verplaats de gebruiker naar de gewenste locatie/ruimte.

Onderstel Mobi Pro & Mobi Pro Flexi

De Mobi Pro heeft een onderstel met poten welke na de voetplaat naar binnen versmald wordt. Met dit onderstel kun je de meest gangbare toiletotten en tevens vallen de poten precies tussen de poten van bijvoorbeeld een stoel.



De Mobi Pro Flexi heeft een onderstel met rechte poten welke versteld kunnen worden. Het onderstel is voorzien van een mechanisch spreidmechanisme. Doormiddel van de pootspreid-hendel kunnen de poten van de Mobi in drie verschillende standen gezet worden.

Het mechanisme is voorzien van een plaatje met drie standen. De volgende opties zijn mogelijk:

Linker opening	parallel, om de Mobi te verrijden
Middelste opening	halfopen, voor het benaderen van smalle "zitplaatsen"
Rechter opening	wijdste opening voor brede "zitplaatsen"



Achter wielen met rem

Voor ieder gebruik moeten de remmen gecontroleerd worden. De Mobi is voorzien van vier wielen, waarvan twee geremde wielen aan de achterzijde. De wielen kunnen gemakkelijk op de rem gezet worden door met de voet door op het rode remplaatje te drukken. Om de Mobi weer van de rem af te halen, dient het rode remplaatje naar boven gedruwd te worden.

Bedieningsinstructie

Transport en opslag

De Mobi dient te worden opgeslagen in een droge ruimte waarin geen extreme temperaturen voorkomen.

Rijden met de Mobi

Voor het voortbewegen en het manoeuvreren van de Mobi Pro maakt u gebruik van de handvatten. Houd hierbij rekening met de volgende drie tips.



Tip. Maak gebruik van je lichaamsgewicht bij duwen (RijRegel 1)

Laat je eigen lichaamsgewicht het werk doen. Volg de drie stappen van de pijltjes. Ga in een schredestand staan. Zet je handen ontspannen op de tillift op een handige plek. Als je lager duwt, benut je je eigen gewicht meer (je hangt 'schuiner'). Houd je schouders en rug ontspannen en je armen losjes gestrekt. Til nu je voorste been denkbeeldig ietsje op alsof je een stapje zet (pijltje 1). Dan doet je lichaamsgewicht het werk (pijltje 2) en komt de tillift in beweging (pijltje 3).



Tip. Maak gebruik van je lichaamsgewicht bij trekken (RijRegel 2)

Ook trekken werkt zo, maar omdat je de lift zelf moet vasthouden (trekken met je handen en vingers) is het belastender dan met ontspannen handen duwen. Volg de drie pijltjes. Sta in een ontspannen schredestand. Til je achterste been denkbeeldig op alsof je een stapje doet (pijltje 1) en hang achterover ('windsurfer'). Je lichaamsgewicht doet het werk (pijltje 2): de tillift komt in beweging (pijltje 3). Pas wel op voor je voet! Beweeg altijd rustig: dat is veel gunstiger.



Tip. Zet je voet op het onderstel en laat de tillift om zijn eigen as draaien en niet om jou heen (RijRegel 2)

Als je de tillift een klein stukje wilt bewegen of draaien, wrik dan nooit met je schouders en armen de lift om. Je voet op het onderstel van de lift duwen is meestal genoeg. Zo kan je ook dwarse wielletjes in de juiste rijrichting zetten of de lift draaien. Houd dan de lift vast en duw met je voet. De lift zal draaien. Draai de lift nooit om je heen: dat is veel te belastend.

Inspectie en onderhoud

Dagelijkse schoonmaak en onderhoud

- Maak regelmatig het rij-oppervlakte van de Mobi schoon met een vochtige doek en geschikt reinigingsmiddel.
- Houd de wielen van vrij van stof en haren. Controleer dagelijks op de verrijdbaarheid.
- Controleer de werking van het pootspreid-mechanisme (Flexi).
- Na het beëindigen van de transfer dient de Mobi met een vochtige doek te worden afgenomen, welke is doorweekt met een reinigingsmiddel.

Instructies voor reinigen

Let op de specificaties van de fabrikant van het reinigingsmiddel voor het schoonmaken.

Gebruik zo nodig geschikte beschermende kleding zoals jasschorten, bril en handschoenen.

Grove vervuiling dient onmiddellijk verwijderd te worden.

Het frame kan schoongemaakt worden met een vochtige doek.

Gebruik een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel voor hardnekkige vlekken.

Zorg ervoor dat alle oppervlakken van de Mobi grondig gereinigd worden.

Gebruik geen schuurmiddelen en bijtende substanties.

Instructies voor desinfectie

Let op de specificaties van de fabrikant van het desinfecterende product.

De Mobi is geschikt voor desinfectie huishoudelijke ontsmettingsmiddelen.

Alle oppervlakken zijn te vegen met een schone doek die bevochtigd is met een ontsmettingsmiddel. Bevochtigd de Mobi gelijkmatig met een ontsmettingsmiddel.

Spoel het ontsmettingsmiddel niet en laat het product aan de lucht drogen.

Vervolgens dient de Lexa geïnspecteerd te worden op schoonheid en schades.

Periodiek onderhoud

Onderhoud van de Mobi dient te worden uitgevoerd door een door de fabrikant erkende monteur.

Het is aanbevolen om een onderhoudscontract af te sluiten met een gecertificeerd bedrijf om ervoor te zorgen dat de Mobi altijd goed onderhouden blijft.

- De Mobi dient jaarlijks onderworpen te worden aan "onderhoud".
- Onderhoud aan de Mobi dient te worden uitgevoerd door een door de fabrikant erkende monteur.
- Hetzelfde geldt voor eventuele reparaties.
- Mochten er na het lezen van deze punten nog vragen zijn, neem dan contact op met de afdeling service via service.nl@humancaregroup.com of bel naar 0577-41 21 71 en kies voor de afdeling service.

Afvoeren

De Mobi is niet voorzien van elektrische onderdelen, dus kan afgevoerd worden volgens algemeen huishoudelijk apparaat. Echter raden wij dit af en kunt u het best contact opnemen met de gemeente of Human Care voor het afvoeren van het hulpmiddel.

Certificaten

De kwaliteit van de te leveren producten en diensten door Human Care Nederland wordt gewaarborgd door de succesvolle toepassing van het gecertificeerde kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 norm. Het kwaliteitssysteem van Human Care Nederland beschrijft het primaire proces van ons bedrijf en bevat onderdelen zoals management, technische dienst, marketing en klantenservice.

Het kwaliteitssysteem is schriftelijk vastgelegd in ons "Handboek Kwaliteit"



Service en garantie

Human Care biedt garantie op nieuw apparatuur aangeschaft in de Europese Unie die een defect als gevolg hebben van productie en/of materiële gebreken, vertoond gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

In het kader van deze garantie bieden wij onder voorbehoud van de mogelijkheid van reparatie, kosteloos vervanging.

Deze garantie is niet van toepassing als het defect van het toestel aan on gepaste behandeling of met minachting van het beoogde gebruikersdoel en de gedragsregels die in deze gebruikshandleiding worden beschreven.

Voor schade en fouten die zijn veroorzaakt door natuurlijke slijtage of transport van het hulpmiddel, staan wij niet garant.

Fabrikant & leverancier

Fabrikant

Koval d.o.o.
Loka pri Zusmu 9
3223 Loka pri Zusmu
Slovenië

Leverancier

Human Care Nederland
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Tel: 0577 41 21 71
Info.nl@humancaregroup.com
www.humancare.nl



Human Care Nederland B.V.
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Web: www.humancare.nl
Mail: info.nl@humancaregroup.com
Tel: 0577-41 21 71

Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Human Care Nederland B.V.

Document: Gebruikshandleiding-Mobi-Pro-&-Flexi-def1.2018
(2018-07-13)