

Veilige E-clips

Ergonomische ondersteuning

Comfortabele pasvorm



Ondersteuning bij het opstaan

Tijdens het opstaan van een cliënt komt een verzorger vaak handen tekort om het voor beiden veilig en ergonomisch te laten verlopen. Onze Back Belt E-Clip biedt precies de ondersteuning die nodig kan zijn voor juist gebruik van onze sta-op-lift seBastian II.



Een natuurlijke beweging wordt gestimuleerd doordat de gepolsterde rug een prettige steun in de rug van de cliënt biedt tijdens de opwaartse bewegingsrichting. De Back Belt geeft tevens een veilig gevoel en voorkomt achterwaarts vallen. Door de geïntegreerde tailleband met gespsluiting blijft de band op zijn plaats zitten tijdens de gehele transfer. Het antislip aan de binnenzijde van het rugdeel voorkomt omhoog glijden van de band tijdens het opstaan. Hierdoor kunnen zowel de cliënt als de verzorger zich volledig richten op het sta-proces. De Back Belt E-clip is een welkome aanvulling tijdens het gebruik van een sta-op-lift wanneer de cliënt beperkte rompstabiliteit heeft of andere redenen waardoor (op)staan lastig is.

De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor de tilband aan een lift, die de kans op fouten aanzienlijk vermindert. De clip wordt om de paddenstoelbevestiging van het tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijk hoorbare 'klik'. De verzorger weet nu dat de clip goed vastzit en niet meer onverwachts kan losschieten.

Gemakkelijk in passing en verzorging zijn onze tilbanden door de kleurcode voor snelle en gemakkelijke identificatie van de juiste maatvoering. Human Care tilbanden zijn geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Het ontwerp kenmerkt zich door een sterk harnas van groen band rondom de tilband, wat een belastbaar en duurzaam product biedt.



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

Gebruik



Van en naar het bed

Geschikt voor het opstaan vanaf een bed en gaan zitten op een bed.




Van en naar een stoel

Geschikt voor positionering in een stoel en voor staande transfers in en uit een stoel.



Sta-training

Geschikt voor sta-training en revalidatie-oefeningen.

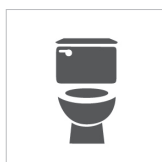

Toiletteren

Biedt extra steun tijdens een bezoek aan het toilet.

Kenmerken




Polyester

Duurzaam materiaal, lage wrijvingscoëfficiënt waardoor gemakkelijk aan te brengen en schoon te maken.



E-clip ingebouwde borging

Eénhandig te bedienen. Universeel inzetbaar op alle liften die zijn uitgerust met paddenstoelbevestiging Ø 6,8-8,2 mm.

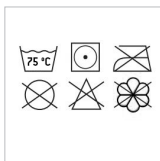


Verzorgingsinstructies

Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.



Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Back Belt E-clip S	25130C-S	Small		69 cm / 27.2"	27 cm / 10.6"	33cm / 13"
Back Belt E-clip M	25130C-M	Medium		83 cm / 32.7"	30 cm / 11.8"	39 cm / 15.3"
Back Belt E-clip L	25130C-L	Large		92 cm / 36.2"	34 cm / 13.4"	44 cm / 17.3"
Back Belt E-clip XL	25130C-XL	Extra Large		103 cm / 40.5"	39 cm / 15.3"	50 cm / 19.7"
	Maximaal gebruikersgewicht:	250kg / 551lb				

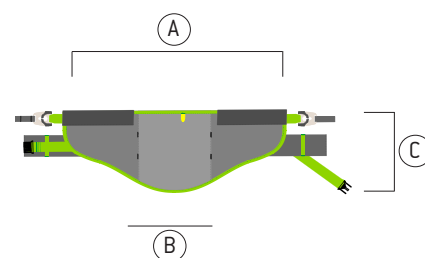

*We improve freedom of movement
and quality of care for people.*

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY

Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com