



Comfortabele pasvorm

Optimale ondersteuning

Veilige E-clips



Geschikt voor vele tilsituaties

Onze Full Body Sling E-clip is een comfortabele tilband, die uitermate geschikt is voor personen die tijdens het tillen volledige ondersteuning van het lichaam prettig vinden. Deze tilband is verkrijgbaar met geïntegreerde hoofdsteen of met verwijderbare baleinen voor het geval deze tilband als verblijfsband wordt gebruikt.



De Full Body Sling E-clip biedt door zijn vorm een comfortabele ondersteuning aan het hoofd, de romp en bovenbenen, waardoor de cliënt een veilige houding ervaart. Deze tilband brengt de cliënt in een achterovergekanтелеde positie, die de druk op de benen vermindert. Dit kan ook een prettige houding zijn voor cliënten met een verminderde rompbalans en/of met de neiging om te overstrekken. Deze gekanтелеde positie voorkomt tevens dat een cliënt uit de tilband glijdt. De geïntegreerde en verstevigde hoofdsteen maakt deze tilbands zelfs geschikt voor het tillen van een cliënt vanaf een vlakke ondergrond, zoals een vloer. Deze tilbanden zijn ontworpen voor vierpuntsbevestiging aan een kanteljuk en zijn verkrijgbaar in twee materialen.

Polyester net is een zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt. Het heeft licht elastische eigenschappen om zich te vormen naar het lichaam. De tilband kan korte tijd achter de cliënt blijven. Extra voordeel is dat de tilband geschikt is voor douchen en baden.

Het Soft Air Mesh materiaal is een lichtgewicht, koele, zachte en ademende net stof. Deze stof heeft vochtbeheersende eigenschappen, die transpiratievocht via het weefsel naar het oppervlak transporteert waar het snel kan verdampen. Het materiaal heeft tevens het voordeel dat het minder gevoelig is voor bacteriën voor betere hygiëne. De tilband heeft "two-way stretch" eigenschappen, die in staat zijn het lichaam te omhelzen als een tweede huid.



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

Accessoires



4-punts kanteljuk

Voor plafondtillift HeliQ, verkrijgbaar in Small (manueel), Medium en Large (elektrisch). Art. nr. 92441, 92442 en 92443.




4-punts kanteljuk

Voor Diana II Comfort 4ESB (elektrisch). Art. nr. 90560.



4-punts kanteljuk

Voor Diana II/ Diana II Comfort 4MSB (manueel), Art. nr. 90558/ 90559.

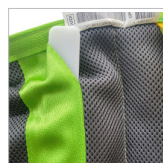

In-Situ

De Full Body Sling In-Situ E-clip heeft verwijderbare baleinen voor het geval de tilband achter de cliënt blijft. Art. nr. 25011C

Gebruik




Van en naar het bed

Geschikt voor het tillen vanaf een bed en gaan zitten op een bed.



Van en naar een stoel

Geschikt voor positionering in een stoel en voor transfers in en uit een stoel.

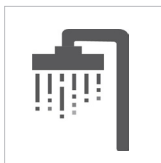

Douchen


Polyester Net materiaal is geschikt voor natte omgeving.



Tillen vanaf de vloer

Ontworpen om op te tillen vanaf de vloer.

Kenmerken

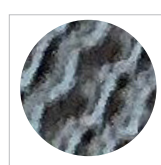

Polyester Net

Zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt. Ideaal voor douchen en baden. Art. nr. 25005C.




E-clip ingebouwde borging

Eénhandig te bedienen. Universeel inzetbaar op alle liften die zijn uitgerust met paddenstoelbevestiging Ø 6,8-8,2 mm.



Soft Air Mesh

Geweldig drukverlichtend effect. De druk is goed verdeeld binnen de 3D-structuur van de stof. Voorkomt en beschermt. Art. nr. 25010C/25011C

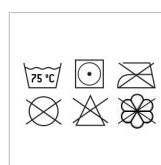


Verzorgingsinstructies

Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.

Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Full Body Sling In-Situ E-clip JS Full Body Sling In-Situ E-clip Net JS	25011C-JS 25006C-JS	Junior Small	JS	16 cm / 6.3"	63 cm / 24.8"	76 cm / 29.9"
Full Body Sling In-Situ E-clip JM Full Body Sling In-Situ E-clip Net JM	25011C-JM 25006C-JM	Junior Medium	JM	19 cm / 7.5"	67 cm / 26.4"	80 cm / 31.5"
Full Body Sling In-Situ E-clip S Full Body Sling In-Situ E-clip Net S	25011C-S 25006C-S	Small	S	31 cm / 13.8"	85 cm / 30.3"	90 cm / 35.4"
Full Body Sling In-Situ E-clip M Full Body Sling In-Situ E-clip Net M	25011C-M 25006C-M	Medium	M	40 cm / 15.7"	92 cm / 34.6"	91 cm / 35.8"
Full Body Sling In-Situ E-clip L Full Body Sling In-Situ E-clip Net L	25011C-L 25006C-L	Large	L	40 cm / 17.3"	98 cm / 38.6"	100 cm / 39.3"
Full Body Sling In-Situ E-clip XL Full Body Sling In-Situ E-clip Net XL	25011C-XL 25006C-XL	Extra Large	XL	44 cm / 18.9"	105 cm / 41.3"	102 cm / 40.1"
Full Body Sling In-Situ E-clip XXL Full Body Sling In-Situ E-clip Net XXL	25011C-XXL 25006C-XXL	Extra Large (2x)	XXL	44 cm / 18.9"	111 cm / 43.7"	106 cm / 41.7"
Full Body Sling In-Situ E-clip XXXL Full Body Sling In-Situ E-clip Net XXXL	25011C-XXXL 25006C-XXXL	Extra Large (3x)	XXXL	44 cm / 18.9"	118 cm / 46.4"	108 cm / 42.5"
Maximum user weight		300 kg / 660 lbs				

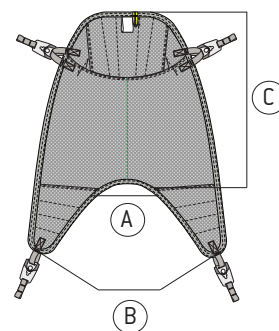

98011 Rev5 NL Product Sheet Full Body Sling E-clip, Aug25



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com