





**Belangrijk!** Deze beknopte handleiding is geen vervanging voor de gebruikershandleiding die kan worden gedownload op [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com). Lees alle instructies voor gebruik!

## Components

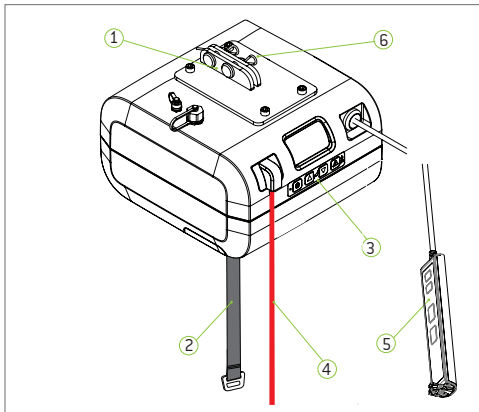

- 1 Bevestiging voor loopwagen
- 2 Liftband
- 3 Secundair bedieningspaneel
- 4 Noodstop band
- 5 Handbediening (IPX7)
- 6 Montagepennen

## Secundaire bedieningspaneel

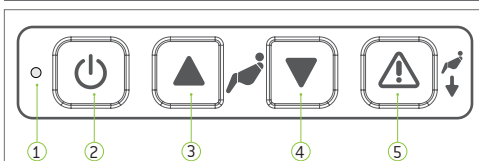

- 1 Statusindicatielampje
- 2 Inschakelen/Uitschakelen
- 3 Omhoog-knop
- 4 Omlaag-knop
- 5 Nooddaalfunctie


## Indicatielampje

- |                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Knipperend groen</b><br>Aan/Gereed voor gebruik<br>Volle batterij                          | <b>Permanent rood</b><br>Lift is vergrendeld<br>Storing zoeken!                  |
| <b>Knipperend geel</b><br>Aan/Gereed voor gebruik<br>Waarschuwing batterij opladen            | <b>Permanent Geel</b><br>Lift opladen<br>Functie geblokkeerd                     |
| <b>Knipperend rood</b><br>Aan/Gereed voor gebruik<br>Lage batterij<br>Direct opladen batterij | <b>Knipperend groen/geel</b><br>Serviceinterval gepasseerd<br>Dienst verlenen    |
| <b>Permanent groen</b><br>Lift in gebruik<br>Lift geladen                                     | <b>Knipperend rood/geel</b><br>Serviceinterval gepasseerd<br>Batterijniveau Laag |



**Belangrijk!** Deze plafondlift is ontworpen en getest voor gebruik binnenshuis met één cliënt tegelijk. Dit product mag niet in water worden ondergedompeld.  
**Lees alle instructies voor gebruik!**

## Handbedieningsfuncties

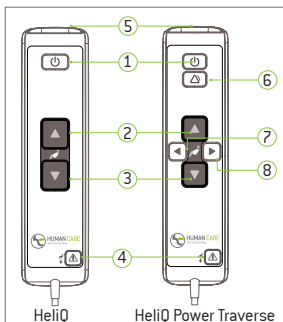


- 1 Uit/Aan-knop
- 2 Omhoog-knop
- 3 Omlaag-knop
- 4 Nooddaalfunctie
- 5 USB-C en oplaadpoort

- Alleen voor Power Traverse:
- 6 Alarmknop
  - 7 Achteruit rijden
  - 8 Voorwaarts rijden

## De lader



**Knipperend rood - Laad onmiddellijk op!**

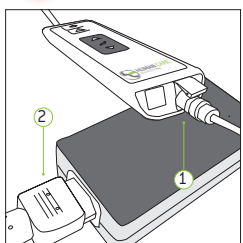

- 1 Sluit de stekker van de oplader aan op de handbediening.
- 2 Sluit de stekker aan op de oplader en steek de stekker in het stopcontact om op te laden. De lader mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Let op: Als de noodstop is geactiveerd, wordt de lift niet opgeladen!



**Belangrijk!** De lift mag alleen worden gebruikt met een door Human Care aanbevolen lader.


Models: 55100, 55110, 55120

(PT) 55130, 55140, 55150

Human Care HC AB. Alle rechten voorbehouden.



## De lift gebruiken

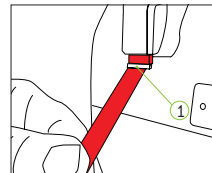

### Noodstop-activering

Trek aan de rode band om te activeren.

### Noodstop-uitschakeling

Druk de activeringsknop (1) bovenaan de noodstopband omhoog.

**Belangrijk!** Nooddaalfunctie mag alleen in noodsituaties worden gebruikt. Er is een vertraging van 3 seconden.

- 1 Handbediening gebruiken: Druk tegelijkertijd op de knop (3) en de nooddaalknop (5) van het secundaire paneel.
- 2 Secundair paneel: druk tegelijkertijd op knop (4) en nooddaalfunctie (5).




### De lift ophangen

De lift wordt direct op de loopwagen gemonteerd die zich in de rail bevindt. Gebruik geen afstandsbanden. Verwijder de borgpennen die de bouten op hun plaats houden. Verwijder bouten en lijn de gaten in de rail uit met gaten in de loopwagen.

Plaats de bouten door de gaten en zet ze vast met pinnen. Om los te maken, omgekeerd proces.

**Belangrijk!** De liftband moet strak blijven staan tijdens het invoeren in de lift.

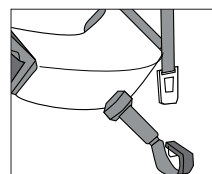


### Tiljuk

Laat de liftband zakken tot een comfortabele werkhoogte. Verbind het tiljuk met de lift door het tiljuk diagonaal van onder de liftband te haken.



### Tilbanden

Bevestig de lussen van de schouders eerst aan het tiljuk en vervolgens de beenlussen aan de beenhaken. Zorg ervoor dat de banden onder de veiligheidspin zijn vastgezet.

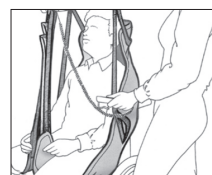

### Juiste tiltechnieken

Gebruik het tiljuk niet om de cliënt en de lift te verplaatsen. Houd de haken niet vast tijdens het tillen. Zodra de cliënt comfortabel in de tilband zit, brengt u de tilift omhoog, houdt u de tilband vast en positioneert/verplaatst u de cliënt.

## Algemene zorg



De lift moet elke nacht worden opgeladen.



Afnemen met een licht bevochtigde droogdoek.



Desinfecteren met DuPont™ Virkon®.



Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen op de lift.



Niet onderdompelen in water.



Activeer de noodstop wanneer niet in gebruik.



**Belangrijk!** Gebruik alleen geautoriseerde methoden om te transporteren! De lift moet altijd in horizontale positie worden opgeslagen of verplaatst. Rust op wagen om te verplaatsen of gebruik goedgekeurde draagriem<sup>1</sup>.  
<sup>1</sup> Voorzichtigheid! Bij het gebruik van de liftband moet extra voorzichtig zijn om de liftband niet te kreuken of te buigen.

## Inspectie

**Jaarlijkse inspectie** - De lift moet ten minste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd door een gekwalificeerde technicus die is gecertificeerd door Human Care.

**Maandelijkse inspectie** - Controleer de liftbanden op beschadiging of slijtage. Voer over de hele lengte om een goede werking te garanderen.

**Dagelijkse inspectie** - Inspecteer de lift vóór gebruik altijd op zichtbare tekenen van schade. Zorg ervoor dat de lift correct op de afstandsband of loopwagen is gemonteerd. Controleer tilbanden en liftbanden altijd voor gebruik op tekenen van slijtage. Niet gebruiken bij zichtbare slijtage.

## Storing zoeken



**Als het indicatielampje niet brandt, controleer dan het volgende:**

- Netschakelaar staat aan
- Batterijen hoeven niet te worden opgeladen
- Noodstopknop is niet ingedrukt (uitschakelen door rechtsom te draaien)



**Als het indicatielampje knippert, controleer dan het volgende:**

- Controleer de functies van de handbedieningsknop omhoog/omlaag wanneer ingedrukt (vervang indien nodig)
- Bij het omhoog brengen staat de lift nog niet in de maximale bovenste stand
- Bij het omlaag brengen staat de lift nog niet in de maximale onderste stand



**Als het indicatielampje constant rood is:**

- De liftmotor is oververhit - laat afkoelen
- De lift is overbelast - laat zakken met nooddaalknop



**Als het indicatielampje constant geel is:**

- bezig met opladen



**Als de liftband niet goed uitloopt:**

- Trek de liftband omhoog terwijl u op de knop Omlaag op de handbediening / het bedieningspaneel drukt



**Als de indicator rood knippert:**

- De batterijen moeten worden opgeladen, de cliënt mag nog een paar keer worden opgetild