



High Basic Sling

Onze High Basic Sling is een comfortabele tilband voor cliënten met verminderde rompstabiliteit. Het design komt overeen met de Basic Sling, waarbij de High Basic Sling extra ondersteuning aan hoofd en nek biedt tijdens transfers.



Veel ondersteuning

De High Basic Sling is ideaal voor cliënten met behoefte aan veel steun en met hoge of lage spiertonus. De tilband garandeert veiligheid tijdens transfers, zowel voor client als zorgverlener en is geschikt om te gebruiken bij het tillen van de grond. Om optimale steun in de nek en hoofdregio te garanderen is de tilband voorzien van uitneembare baleinen.

materiaal is flexibel, luchtig en droogt snel waardoor het bij uitstek geschikt is voor gebruik in de badkamer. De tilband kan gebruikt worden als 2-punts, 3-punts of 4-punts bevestiging, afhankelijk van de wens.



Twee uitvoeringen

De High Basic Sling is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Polyester en Polyester Net. Het Polyester Net materiaal is zeer goed ademend en geleid warmte en vocht optimaal. Hierdoor hoeft de tilband niet direct na de transfer verwijderd te worden en kan kort worden achtergelaten. Het

Eenvoudig onderhoud en passing

Onze tilbanden worden volgens de hoogste standaarden ontworpen en gefabriceerd. De tilbanden zijn voorzien van verstevigde banden en "high strength nylon webbing" om de tilbanden sterk genoeg te maken voor iedere situatie. Elke tilband is voorzien van kleur gecodeerd label waardoor de juiste tilband snel gekozen kan worden. Tevens zijn de bevestigingslussen ook van kleuren voorzien waardoor de juiste tilhouding kan worden bereikt.



Accessoires



Verlenglussen

Worden gebruikt om de lussen van de tilband te verlengen om de zithouding te veranderen of de benen bij elkaar te houden. Assortiment lengte. Part no: 21180*



Gepolsterde- en verstevigde beensteunen

Ideaal voor gebruikers met een gevoelige- of pijnlijke huid. In maat S, M en L. Part no: 21146- (Maat).



Juk beschermer

Bescherm de gebruiker tegen eventueel stoten tegen het juk. Niet geschikt voor gebruik in natte omgeving. Part no: 50866



Juk voor 2-, 3- of 4-punts ophanging

Part no: 57551, 55764 (2- of 3-punts juk), 55619: (4-punts juk)

Gebruik



Van en naar het bed

Geschikt voor het tillen vanaf een bed en gaan zitten op een bed.



Van en naar een stoel

Geschikt voor positionering in een stoel en voor een transfers in en uit een stoel.



Douchen


Polyester Net materiaal is geschikt voor natte omgeving.

Kenmerken




Polyester Net

Zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt. Ideaal voor douchen en badderen.

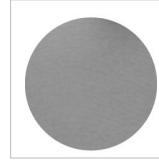

Polyester

Duurzaam materiaal, lage wrijvingscoëfficiënt waardoor gemakkelijk aan te brengen en schoon te maken.

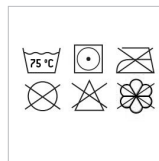


Care

Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.

Technische specificaties

Artikelnummer		Maat	Kleur	A	B	C
Polyester net	Polyester					
25037-JS	25032-JS	Junior Small		22 cm	62 cm	67 cm
25037-JM	25032-JM	Junior Medium		28 cm	65 cm	74 cm
25037-S	25032-S	Small		35 cm	77 cm	86 cm
25037-M	25032-M	Medium		40 cm	88 cm	91 cm
25037-L	25032-L	Large		44 cm	98 cm	100 cm
25037-XL	25032-XL	Extra Large		48 cm	102 cm	102 cm
25037-XXL	25032-XXL	Extra Extra Large		52 cm	108 cm	107 cm
Maximaal gebruikers-gewicht: 300kg						

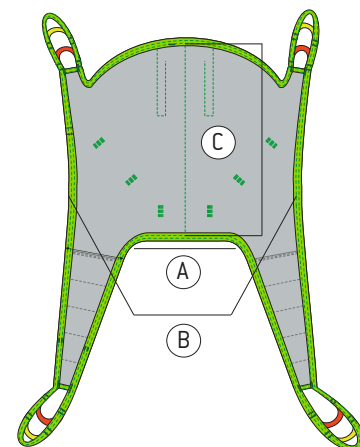

* Verkrijgbaar in verschillende lengtes: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)



Wij bieden bewegingsvrijheid
en uitstekende kwaliteit van zorg.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elsperweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com