



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Assembly Instruction / Monteringsanvisning Cross handle / Tvärhandtag art nr: 70844 & 70845

Carl-Oskar & Rebel: 62 cm wide, not including
Reinforced / 62 cm bredd, ej förstärkta modeller



Monteringsanvisning

Tvärhandtag höger hand (70844) Tvärhandtag vänster hand (70845)


För modeller: Carl-Oskar och Rebel (62 cm bred ej förstärkt)

Art nr: 11250, 11251, 22240, 22241

#	Nummer/Benämning	Antal
1	Förmonterat tvärhandtag	1
2	Vajerlås	2
3	Ändavslut	2

Verktyg att ha tillgängligt:

- Insexnyckel storlek 4mm
- Blocknyckel storlek 8mm
- Avbitartång

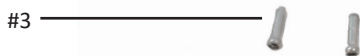

Montering:

Steg 1.

Demontera de befintliga handtagsrören och bromsvajrarna från rollatorn. Spara bromsfjädrarna till steg 3B.

Steg 2.

Montera tvärhandtaget (#1) i ramen på Rollatorn. Dra åt vingmuttern.

Steg 3.

A. Trä bromsvajern igenom det övre hålet på bromsen.

B. Återmontera bromsfjädern.

C. Trä bromsvajern genom det undre hålet på bromsen.

Steg 4.


Trä på varjerlåset (#2) på vajern. Lås genom att dra åt skruven på vajerlåset.

Steg 5.

Testa bromsarna och om nödvändigt justera därefter bromsjusteringsskruven och lås därefter med muttern.

Steg 6.

Knipsa av vajern nedtill, men behåll ca 2-3 cm i änden. Montera därefter ett ändavslut (#3) och kläm åt med en tång.

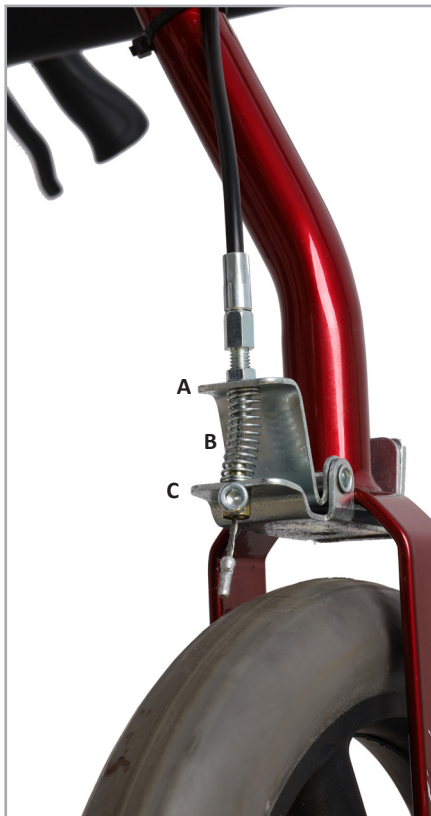

Assembly instruction

Cross handle left hand (70844) Cross handle right hand (70845)


For models: Carl-Oskar and Rebel (62 cm wide, not including Reinforced models)

Art nr: 11250, 11251, 22240, 22241

#	Nummer/Benämning	Antal
1	Pre-assembled cross handle	1
2	Wire lock	2
3	End cap	2

Tools to have available:

- Allen key size 4mm
- Block wrench size 8mm
- Pliers/Nippers

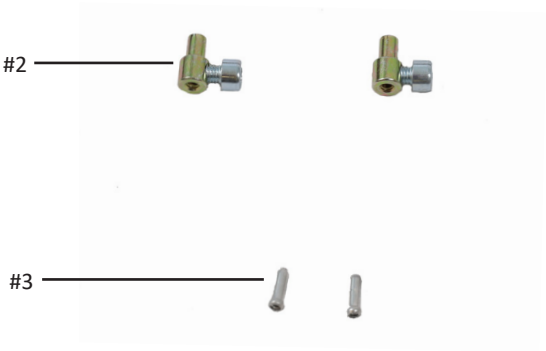

Assembly:

Step 1.

Remove the existing handle tubes and brake cables from the rollator. Save the brake springs for step 3B.

Step 2.

Mount the cross handle (#1) in the frame of the Rollator. Tighten the wing nut.

Step 3.

A. Thread the brake cable through the upper hole on the brake.

B. Refit the brake spring.

C. Thread the brake cable through the lower hole on the brake.

Step 4.


Thread the safety lock (#2) onto the wire. Lock by tightening the screw on the cable lock.

Step 5.

Test the brakes and, if necessary, adjust the brake adjustment screw and then lock with the nut.

Step 6.

Clip off the wire at the bottom, but keep about 2-3 cm at the end. Then install the end cap (#3) and clamp with pliers.

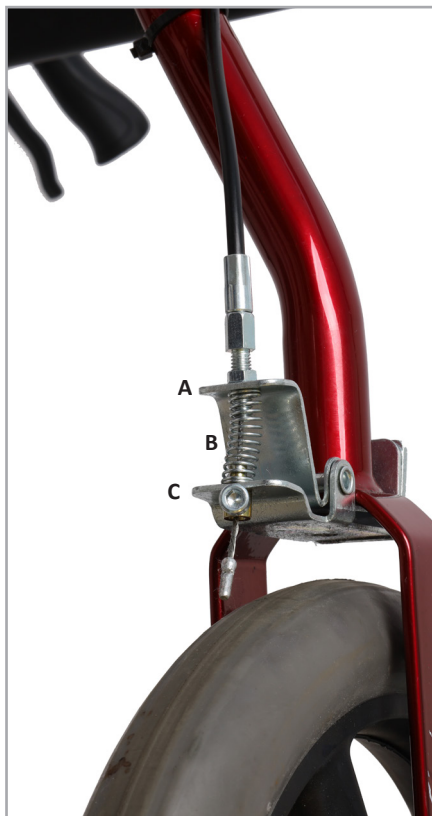

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B

117 43 Stockholm

Phone: +46 8 665 35 00

Fax: +46 8 665 35 10

Email: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1

Phone: +1 613 723 6734

Fax: +1 613 723 1058

Email: info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Street, Suite K

Austin, TX 78754 USA

Phone: +1 512 476 7199

Fax: +1 512 476 7190

Email: info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten

Phone: +31 577 412 171

Fax: +31 577 412 170

Email: info.nl@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com

